

## INSTRUCCIONES DE USO

La membrana de colágeno de más lenta reabsorción.

Estas son las 6 reglas que todo nuevo usuario debe saber antes de colocar su primera membrana Ossix Plus para obtener un excelente resultado.

- Hidratar la membrana con una solución salina esterilizada durante unos pocos segundos hasta que esté completamente húmeda y retirar.
- En caso de colocarse entre dientes, dejar espacio de 1mm para dientes adyacentes.
- Puede recortar la membrana con tijeras curvas. No deje cortes en la membrana.
- Si es necesario, puede fijar la membrana con sutura (\*). Utilice suturas para periostio, es la técnica más recomendada. No se recomienda el uso de tornillos ni chinchetas.
- Cuando vuelva a reabrir la zona podrá ver restos de membrana, no los quite ya que estos se osifican con el tiempo.
- Si se expone de forma prematura, vuelva a suturar el colgajo si es móvil, recomiende al paciente se enjuague con clorhexidina y evite alimentos duros o calientes. La membrana puede permanecer expuesta hasta 5 semanas.

(\*) En este enlace podrá ver como se aconseja fijarla <https://vimeo.com/145613645>